

ベッド本体の取扱説明書と合わせてよくお読みいただき安全に作業してください。

緊急時の背下げ操作（停電・故障時などの対応）

電動在宅ケアベット和夢 “純”, “雅” は、背ボトムが上がっている状態で、停電などの緊急時に背ボトムが下げられなくなった場合に手で背ボトムを下げるすることができます。



●事故、破損を防ぐために

危険防止のため、お二人で作業されることをお勧めします。

警告 スナップピンを外す際にはラジオペンチやプライヤーを使用してください。

お願い

事故、破損の原因となります。
荷重がすべて背ボトムにかかりますので危険です。必ず手で支えてください。




外した背上げモーターピン、スナップピンは背ボトムを元に戻す際に使用します。
紛失しないように保管してください。


●電力が回復したら以下の手順でベッドをもとの状態に戻してください。

1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. 療養されている方と寝具をベッドから降ろす
3. 作業をやすくするため、ヘッドボードをはずす
4. 背ボトムを手で支え上に上げる
5. コードバンドを外す
6. 背上げモーターピンとスナップピンを取り付ける
7. 背ボトムを手で支えながら降ろす
8. p31の「組立て後の点検」に従い点検を行ってください
9. ヘッドボードを取り付け、寝具、療養されている方をベッドに戻す


1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. 療養されている方と寝具をベッドから降ろす
3. 作業をやすくするため、座ボトムとヘッドボードを取外す
4. 背ボトムが落下しないように手で支える

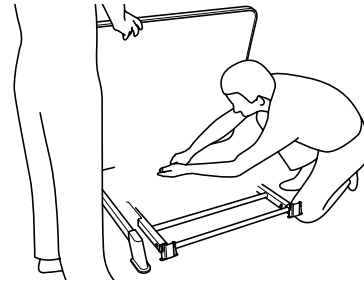

5. 背上げモーターが落下しないように手で支えて背上げモーターピンとスナップピンを取り外す

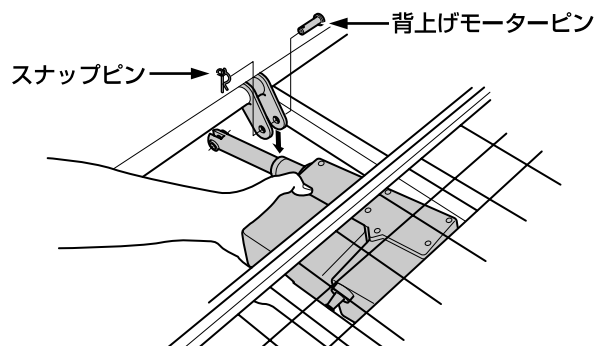

6. 背上げモーターをひもや結束バンドで止める

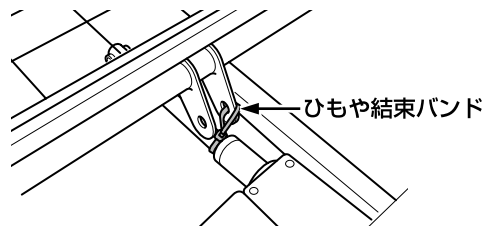

7. 背ボトムを手で支えながら降ろす
8. ヘッドボードを取り付け、寝具、療養されている方をベッドに戻す